

Handy Lift II

NOSTIN LIIKUNTAESTEISILLE UIMA-ALLASKÄYTTÖÖN



turvakori



nostimen runko



avustajan käyttöpaneeli



nostokorin ohjaus



nostin lepoasennossa



suihkupyörätuolilla tai seisten



nostokori altaassa

Handy-Lift II

Liikuntarajoitteisten nosto- ja laskulaite altaassa tapahtuvaan kuntoutukseen / fysioterapiaan pääsyä varten.

- ↻ Käyttäjän ehdoilla suunniteltu kotimainen pylvästyypinen paineilmatoiminen nosto- ja laskulaite liikuntarajoitteisille.
Helppo asentaa uusiin ja vanhoihin kohteisiin, myös eri allastyypeille.
- ↻ **HANDY-LIFT II** on paineilmatoiminen, helppokäyttöinen ja turvallinen. Nostimella päästään altaaseen seisten, istuen tai suihkupyörätuolin kanssa, ilman hankalia välinostoja.
Nostin valmistetaan haponkestävästä teräksestä, korroosiosuojatusta teräksestä, anodisoidusta alumiinista.
Nostokorin suojalevyt polykarbonaattia.
Nostimen käyttö voidaan lukita ”virta-avaimella”
- ↻ Nostinta ohjataan nostokorista ”joystick” säätimellä, hoitajan tai avustajan toimesta nostimen rungon ohjausyksiköstä, sienipainikkeista.
Nostokori nousee irti lattiasta ja kääntyy altaan ylle laskee haluttuun korkeuteen, nousee ylös, kääntyy altaan reunan päälle ja laskeutuu altaan reunalle liikuntarajoitteisen itsensä tai avustajan ohjaamana.

HANDY-LIFT II voidaan käyttää altaissa, joissa on korokkeita.

- ↻ Nostimen ylös / alas, sekä kääntötoiminto mahdollistaa altaaseen pääsyn, myös betonisen (pääty) korokkeen ylitse.

Allasnostin asennetaan käyttöpaikalleen ja läpiviennin kautta paineilmaputki tuodaan nostimelle tekniseen tilaan sijoitetulta kompressorilta.

Nostimen sopivuus kohteeseen on varmistettava rakennepiirustuksista tai paikan päällä.

Allasnostin valmistetaan erikseen jokaista kohdetta varten asiakkaan toivomukset huomioiden.